

Septalkan® TOALLITAS

DETERGENTE DESINFECTANTE
DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

Indicado para la limpieza y desinfección de alto nivel en Equipos biomédicos y superficies de dispositivos médicos invasivos y no invasivos, materiales médicos y dentales que no pueden ser esterilizados o desinfectados por inmersión o métodos tradicionales, limpia y desinfecta en un solo paso, producto listo para usar.

BENEFICIOS

- Inicio de acción inmediato, efecto bactericida, virucida, fungicida y esporicida en 5 minutos.
- Activo sobre las esporas de *Bacillus subtilis* y *Clostridium difficile*.
- No contiene alcohol, por lo que no es corrosivo con el elemento a tratar y no se evapora rápidamente.
- **Septalkan® Toallitas** contiene agentes de limpieza altamente efectivos que funcionan en conjunto con las propiedades de la desinfección de alto nivel, por lo que elimina los microorganismos y reduce el riesgo de contaminaciones cruzadas sin ocasionar daños en los materiales y los equipos.

COMPOSICIÓN

Cloruro de didecildimetilamonio.
Cloruro de alquilbencildimetilamonio (Amonios cuaternarios de cuarta y quinta generación).
Sin perfume. pH neutro

REGISTRO SANITARIO INVIMA No. 2015DM-0014095.

PRECAUCIONES GENERALES

1. Utilice los productos para la limpieza y la desinfección con precaución.
2. Conserve el paquete contenedor de las toallitas bien cerrado, en un lugar fresco y seco, libre de la luz directa del sol.
3. Consulte la hoja de seguridad en www.alkamedica.com



PRESENTACIÓN COMERCIAL

Paquete por 100 toallitas húmedas.

INSTRUCCIONES DE USO Ver al respaldo.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO



No tóxico. No irritante.
No sensibilizante.
No contiene sustancias
alergénicas.



No corrosivo.
No mancha.
Sin EDTA y sin NTA.



Utilizar elementos de
protección personal.



Uso hospitalario.



Producto amigable con el ambiente.
Producto biodegradable.