

INSTRUCCIONES DE USO



Cinta indicadora GKE Steri-Record® Tipo 1 para envolver paquetes

STEAM

Para procesos de esterilización por vapor: 211-351, 211-352, 211-353

Aplicación

La cinta indicadora de proceso está disponible para procesos de esterilización por vapor y contiene un indicador de tipo 1 según la norma EN ISO 11140-1.

El indicador de proceso se adhiere a los paquetes, lo que indica que el paquete ha pasado un proceso de esterilización si el color del indicador ha cambiado. El indicador de proceso sólo proporciona la información teórica de que el envase fue sometido a un proceso de esterilización para evitar la confusión de material esterilizado y no esterilizado.

El uso de cinta indicadora no proporciona ninguna información sobre la esterilidad de la carga. Para controlar la esterilidad de la carga, se debe colocar un indicador de tipo 5 o 6 dentro de cada paquete en el lugar de penetración en el peor de los casos. En el caso de los productos huecos, por ejemplo, los instrumentos quirúrgicos mínimamente invasivos (MIS), se utilizará un sistema indicador de tipo 2 validado para demostrar la penetración y esterilidad del agente estéril.

Descripción del producto

La cinta indicadora es autoadhesiva disponible en rollo para procesos de esterilización por vapor y no contiene látex.

Características de rendimiento

Cada cinta indicadora contiene un indicador de proceso de acuerdo con EN ISO 11140-1 Tipo 1 para su proceso de esterilización.

Manejo de la información

1. Adhiera la cinta indicadora de proceso en las envolturas desechables.
2. El indicador cambia de color cuando se expone a las condiciones de esterilización adecuadas. Compruebe si hay cambios de color después de la esterilización, consulte la tabla a continuación.

	Color del indicador (antes de la esterilización)	Color del indicador (después de la esterilización)
Vapor (211-351 211-352)	Líneas verdes	Líneas negras
Vapor (211-353)	Líneas blancas	

3. Después de su uso, la cinta se retira fácilmente.

Almacenamiento y eliminación

1. Guarde la cinta indicadora siempre entre 5-30 °C o 41-86 °F y una humedad de 5-80% HR.
2. El vapor de los productos químicos, especialmente el peróxido de hidrógeno, puede cambiar el indicador antes o después de la esterilización. Por lo tanto, no los almacene junto con otros productos químicos.
3. La cinta indicadora no debe utilizarse después de la fecha de caducidad. Se puede desechar con la basura normal.

Para obtener más detalles técnicos, comuníquese directamente con tu distribuidor local o con GKE. Le ayudaremos con cualquier pregunta técnica. Visite también nuestro sitio web www.gke.eu para obtener más información.

760-024 ES V05 06/2023